

Dudas comunes

¿Qué es Anuleaf AD?

Anuleaf AD es un dispositivo adhesivo que alivia inmediatamente el dolor causado por las hemorroides. Consiste de dos tiras en forma de arco que levantan los músculos de los glúteos diagonalmente de manera delicada. El producto se adhiere de la curva inferior del glúteo hasta la cadera. Anuleaf AD está disponible en talla pequeña o mediana. Revise la tabla de tallas para determinar cuál le conviene.

¿Cómo funciona el producto?

Anuleaf AD levanta el glúteo máximo delicadamente y de esa manera mantiene el área anal despejada. El bajo contenido de adhesivo en las puntas de las tiras facilita el movimiento del dispositivo para su comodidad durante las actividades diarias.

¿Por qué funciona Anuleaf AD?

Caminar y la presión en los músculos de los glúteos contribuyen al dolor durante un ataque de hemorroides. Anuleaf AD disminuye la fricción creada cuando el área inflamada roza los músculos de los glúteos.

¿Cómo se siente usar el producto?

El material usado permite que las tiras adhesivas sean suaves, flexibles y transpirables. Por tanto, el producto es ligero y no tiene bordes fuertes. Anuleaf AD está diseñado para usarse discretamente y a cualquier hora del día, debajo de su ropa. Anuleaf AD es suficientemente fuerte para mantener los glúteos en posición óptima y a la vez delicado para que pueda removerse facilidad. Anuleaf AD no contiene látex.

¿Cuán frecuente lo debo usar?

El producto puede usarse según sea necesario. Se recomienda usar Anuleaf AD continuamente hasta que el ataque de hemorroides haya terminado. Durante ataques de hemorroides agudos, el producto debe ser usado al menos tres días consecutivos o mientras tenga dolor.

¿Cuánto se debe descansar durante un ataque de hemorroides?

Durante un ataque hemorroidal, el descanso es necesario. Mientras más descance, mas rápido sanará.

¿Qué puedo hacer si la piel se me irrita?

Le recomendamos adherir Anuleaf AD en diferentes áreas de los glúteos y la cadera cada vez que use el dispositivo. Además, debe seguir las instrucciones para removerse el producto y obtener mejores resultados.